

## Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®

Codice	Vedi catalogo o listino prezzi
CND	Z12149085
Repertorio	85569/R
Conformità	CEE 93/42 Dispositivi Medici, Classe I

### Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®



Ø 4mm (adulti)

Ø 2,5 mm (bambini)

Confezione da 1000 pezzi di speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®



Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) di speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®



### Destinazione d'uso

Gli speculum auricolari monouso HEINE AllSpec® vanno applicati sugli otoscopi HEINE compatibili (vedi catalogo) e permettono la migliore analisi dell'orecchio, del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica in ausilio con l'otoscopio HEINE. Gli apparecchi sono destinati a trattamenti di breve durata e possono essere utilizzati anche come strumentazione con prodotti medici non attivi.

## Descrizione

Prodotti in Germania utilizzando solo plastica di alta qualità per uso medico gli speculum auricolari monouso HEINE AllSpec® permettono un inserimento in sede particolarmente sicuro, una trasmissione della luce ed igiene ottimale grazie alla qualità controllata, alla superficie levigata che riduce i riflessi di ritorno e all'incastro più sicuro. Per esami rapidi ed efficaci. Senza spigoli vivi, per garantire il massimo comfort per il paziente. Escludono contaminazioni. Biocompatibile secondo DIN EN ISO 10993.

## Informazioni di sicurezza

Gli otoscopi HEINE compatibili con gli speculum auricolari monouso HEINE AllSpec® (vedi catalogo) possono essere introdotti nel condotto uditivo solo con uno speculum compatibile applicato.

## Smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata. Devono essere rispettate le norme di smaltimento specifiche di ogni paese.

## Montaggio e messa in esercizio:

Inserire lo speculum nell'otoscopio in modo tale che la camma all'interno dello speculum si inserisca correttamente nella fessura a baionetta. Fissare lo speculum con una leggera rotazione verso destra.

## Pulizia e igienizzazione

⊗ **Speculum monouso!** (HEINE AllSpec®/ HEINE UniSpec®) sono destinati solo al monouso.

## Pulizia e igienizzazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

## Accessori

<b>B-000.11.148</b>	Dispenser per Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®
---------------------	--



Può contenere fino a 200 speculum alla volta, struttura semi-trasparente.  
Della giusta dimensione, visibile, e immediatamente disponibile.  
Sempre a portata di mano e ben organizzato.  
Un nuovo speculum pulito per ogni paziente.  
Per il montaggio a parete, anche tramite apposito adesivo.

### Specifiche Tecniche Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®

GENERALI	
<b>Produttore:</b>	HEINE Optotechnik - Herrsching (Germany)
<b>Descrizione:</b>	Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®
<b>Numero catalogo:</b>	consultare il catalogo o listino prezzi
<b>Versione / data:</b>	V02 / 15.04.2014
<b>Varianti prodotto:</b>	vedi catalogo
<b>Materiali:</b>	plastica per uso medico
<b>Ftalati:</b>	Non contiene ftalati
<b>Biocompatibilità:</b>	biocompatibilità applicabile secondo DIN EN ISO 10993
<b>Lattice:</b>	Il prodotto non ha lattice
<b>Condizioni ambientali durante il funzionamento:</b>	Temp.: +10°C to +35°C, umidità relativa: 30%-75%, pressione aria: 700hPa to 1060hPa
<b>Condizioni ambientali durante lo stoccaggio:</b>	Temp.: +5°C to +45°C, umidità relativa: 45%-80%, pressione aria: 500hPa to 1060hPa
<b>Condizioni ambientali durante il trasporto:</b>	Temp.: -20°C to +50°C, umidità relativa: 45%-80%, pressione aria: 500hPa to 1060hPa
<b>Durata:</b>	⊗ MONOUSO!
<b>Accessori:</b>	Dispenser per Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®